

Nº: **OT2828**

Fecha (A-M-D): **2021-10-19**

Generó:

Responsable:

Duración Estimada: 04:00:00

## Lastech SRL

Armenia 2898. Munro. CP 1605,

Buenos Aires, Argentina

☎ 4756-3028

🌐 www.lastech.com.ar

✉ info@lastech.com.ar

## NOTAS:

**ACTIVO:** Autoclave por vapor VAP 5001 170426 HÖGNER

UBICADO EN Ó ES PARTE DE:

CÓDIGO: C170426

TIPO: Autoclave por vapor

PRIORIDAD: Alta

CLASIFICACIÓN 1:

CLASIFICACIÓN 2:

CENTRO DE COSTO:

## TAREA: Observaciones Técnicas

FECHA PROGRAMADA: 2021-10-19

TIPO DE TAREA: Mantenión Preventiva

PRIORIDAD: Alta

ACTIVADOR: Fecha (A-M-D) Cada 30 Dia(s)

CLASIFICACIÓN 1:

CLASIFICACIÓN 2:

FECHA Y HORA DE INICIO: 2021-10-19 11:30

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2021-10-19 12:33

DURACIÓN ESTIMADA: 01:00:00

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 01:02:22

TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00

## PROCEDIMIENTO

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| 1 | Log In Tecnico      | Montañoses 2355, Buenos Aires, Argentina<br>-34.5549206<br>-58.4507501<br>19/10/2021 12:32:52 p. m.       |
| 2 | Operatividad Equipo | <input checked="" type="checkbox"/> Aprobó <input type="checkbox"/> Alerta <input type="checkbox"/> Falló |
| 3 | Observaciones       | Queda operativo   |

## TAREA: Hogner Vap 5001 - Mantenimiento Preventivo

FECHA PROGRAMADA: 2021-10-19

TIPO DE TAREA: Mantenión Preventiva

PRIORIDAD: Media

ACTIVADOR: Fecha (A-M-D) Cada 1 Mes(es)

CLASIFICACIÓN 1: Preventivo

CLASIFICACIÓN 2:

FECHA Y HORA DE INICIO: 2021-10-19 11:16

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2021-10-19 11:22

DURACIÓN ESTIMADA: 03:00:00

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 00:05:52


TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 03:00:00

## PROCEDIMIENTO

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | Limpieza de filtro de fondo de camara | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A |
|---|---------------------------------------|---|

|    |   |   |
|----|---|---|
| 2  | Control y ajuste de micro switch de puerta              | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A |
| 3  | Control de alineación de puerta                         | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A |
| 4  | Verificación de pérdidas durante el ciclo               | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A |
| 5  | Limpieza exterior del equipo                            | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A |
| 6  | Control de cañerías                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A |
| 7  | Limpieza de filtros                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A |
| 8  | Limpieza de pasos restringidos                          | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A |
| 9  | Control de pérdida de válvulas                          | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A |
| 10 | Control de vacío final de bomba de anillo líquido       | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A |
| 11 | Purga de generador de vapor                             | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A |
| 12 | Control de llenado de generador de vapor                | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A |
| 13 | Limpieza de tanque de agua posterior                    | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A |
| 14 | Control de sistema neumático                            | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A |
| 15 | Verificación de válvulas reguladoras de presión de aire | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A |
| 16 | Limpieza de tablero eléctrico                           | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A |
| 17 | Control y ajuste de bornes eléctricos                   | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A |
| 18 | Limpieza de cámara interna                              | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A |
| 19 | Limpieza y lubricación de junta de puerta lado carga    | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A |
| 20 | Limpieza y lubricación de junta de puerta lado descarga | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> N/A |
| 21 | Limpieza interna de generador de vapor                  | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A |

## ADJUNTOS DE LA TAREA

| DESCRIPCIÓN          | ARCHIVO   |
|----------------------|---|
| Limpieza del burlete |  |

Limpieza de filtros



Limpieza de la impresora



Limpieza del control de nivel



Control de corrientes



Control del sistema neumático



ACEPTADO POR

VALIDADO POR

REALIZADO POR